


使用说明书

**TAKARA
BELMONT**

多功能美容仪

品番 AE-FCL*

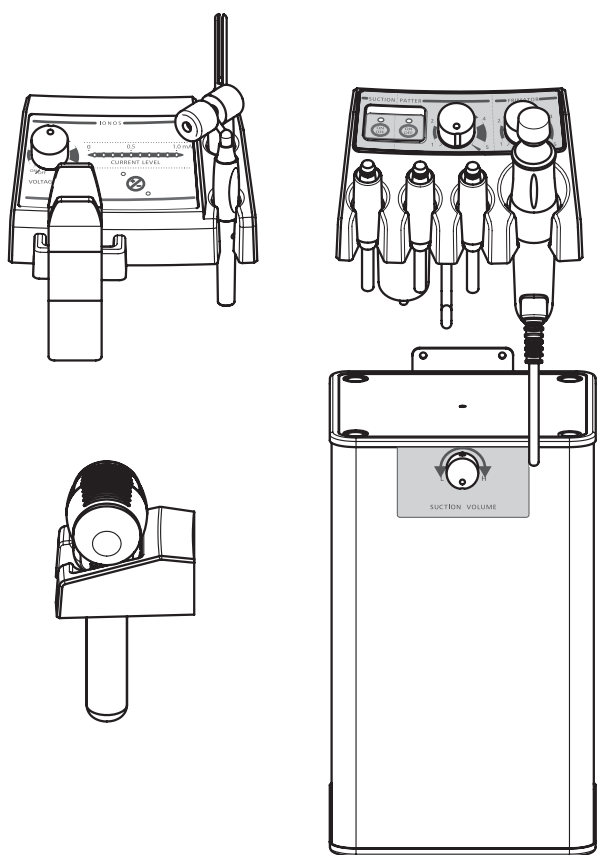

衷心感谢您购买本公司的产品。使用前，请仔细阅读产品说明书和质量保证书，正确，安全使用本产品。之后，请妥善保管。本产品是面向美容，理疗沙龙而开发的美容器械，不适用于美容，理疗以外的用途。若对本产品，产品使用说明书，有任何不明之处，请咨询本公司。若，使用说明书污损，丢失时，可以向本公司索取新的使用说明书。

目 录

安全事项（请务必遵守）	1
部位名称	4
附件	5
使用前准备	7
真空吸引 [SUCTION]	8
振动 [PATTER]	10
去角质清洗 [FRIMATOR]	12
IONOS	15
冷热美容 [PERTIER]	18
保养方法	20
委托修理前	22
产品废弃时	22
关于消耗品（包括备选零部件）	23
日常保养指南	24
规格	25
索引	27

安全注意事项（请务必遵守）

使用前

请仔细阅读“安全注意事项”，正确使用产品。

另外为了预防事故发生，安全使用产品，请严格按照日常检查项目（P24）进行日常检查。

此处的注意事项

都是为了您能够正确使用本产品，避免发生操作者及他人的危害和财产损失。

不顾安全警告，擅自操作，可能会对操作者和他人造成伤害，恕本公司不负任何责任。

造成的事故责任由操作人全权负责。

详细说明如下。

请彻底理解本注意事项的重要性后，阅读一下内容。



警告

无视此标志，错误操作，可能致人死亡，重伤。



注意

无视此标志，错误操作，可能导致人员轻伤以及财产损失。



禁止，不可操作



注意防水



禁止拆卸，修理，改装



有电危险



强制性操作指示



拔掉电源插头



注意高温



警告

严禁触摸机体内部



为避免触电，严禁触摸本机器内部。本机器的维修，请联系本公司的售后。

安全注意事项（请务必遵守）

警告

用电安全警告



每天工作结束，休息日，长时间不使用时，请拔掉电源。电线绝缘老化，可能导致漏电，引起火灾。



工作结束时，请关闭电源。移动器械时，务必拔掉电源



如果电源插头上有碎头发，药水，请用干毛巾擦拭干净。



湿手不要拔电源，以免触电，受伤。

注意防水



不要向机体泼水，或用湿毛巾擦拭机体。以免发生漏电，着火。

严禁私自拆卸，维修



除专业修理人员以外，严禁私自拆卸，修理本机。否则，可能会造成异常发热，受伤。

保养时拔出电源插头



保养的时候，务必拔掉电源。湿手不要拔电源，以免触电，受伤。

日常检查



请务必按照日常检查项目上规定的顺序进行检查。以免机器异常运转，造成烫伤。

请不要倾斜，倒置运输



倾斜，倒置运输可能会导致本机内部漏水，漏电，发热起火。

注意

有以下情况者不适用美容理疗。



- 皮肤病患者（传染性皮肤病，特应性皮炎，湿疹病患者）
- 病人（传染病患者，内脏病患者，精神病患者等等）
- 发热病人
- 皮肤有炎症者
- 日晒之后，起斑疹人群
- 孕妇
- 生产之后，检查有异常的人
- 荷尔蒙混乱人群

- 心脏病患者（心脏起搏器使用者等）
- 癫痫病患者
- 高血压，低血压人群
- 糖尿病人群
- 一年内做过手术的人
- 伤口部位
- 容易上火的人群
- 青春痘部位
- 脓包部位

首次使用本产品做护理时，请务必做过敏测试，以确认使用的化妆品是否会造成客人过敏。使用本产品做护理时，皮肤过于柔嫩的人群和化妆品敏感的人群，有可能发生皮肤问题。如果发生问题，请立即停止护理，送医。

安全注意事项（请务必遵守）

⚠ 注意

电源线的使用



拔电源时，不要直接拉扯电源线，拿住电源插头拔掉电源。



电源线，插头损坏，插板松动时，停止使用。



不要直接拉着电源线挪动机器，禁止拉扯，损伤，弯曲，紧扎电源线。更不要，用重物压，夹电源线。以免造成触电，起火。

真空吸管，振动的使用方法



使用空吸时，不要用手柄去吸药水，以防药水浸入机器内部，造成漏电，引起火灾。



过度，过强的吸引可能会引起皮肤问题。请注意！

当管子挂在挂钩上时，禁止使用，空吸。



使用时，请把吸管从挂钩上拿下来再使用。以免损坏机器。

去角质



不得用毛刷在发线处使用。万一刷子卷到头发，非常危险。使用时，用头巾固定好头发。



注意电动去角质美容仪的防水。以免漏电，触电。




刷子顶端受损时，严禁使用，否则，可能会弄伤客人。



更换刷子等作业必须在机器停止后，进行。




避免过于用力按压刷子，以免伤害客人皮肤。

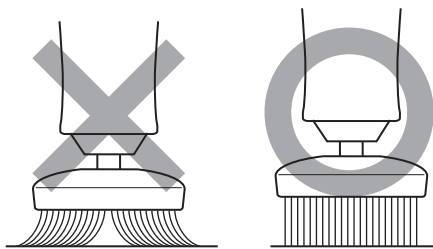

不要托着机架搬动机器




托着手柄搬动机器，禁止托着管子挂钩搬动机器。以免损伤机器。

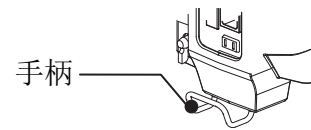

不要拿着导子架移动机器



托着手柄搬动机器，禁止托着导子架搬动机器。以免倾斜，损伤机器。

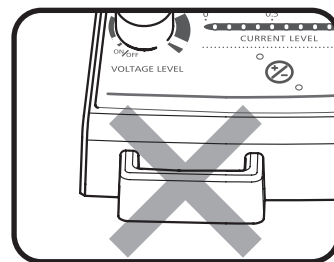


不要往架子和机体上挂任何东西



不要往架子和机体上挂任何东西。以免造成机器倾斜，翻倒。如果，机器翻倒，蒸汽部分的水会露出来，可能造成漏电，触电，火灾等。


产品部位名称

真空吸引，振动，去角质

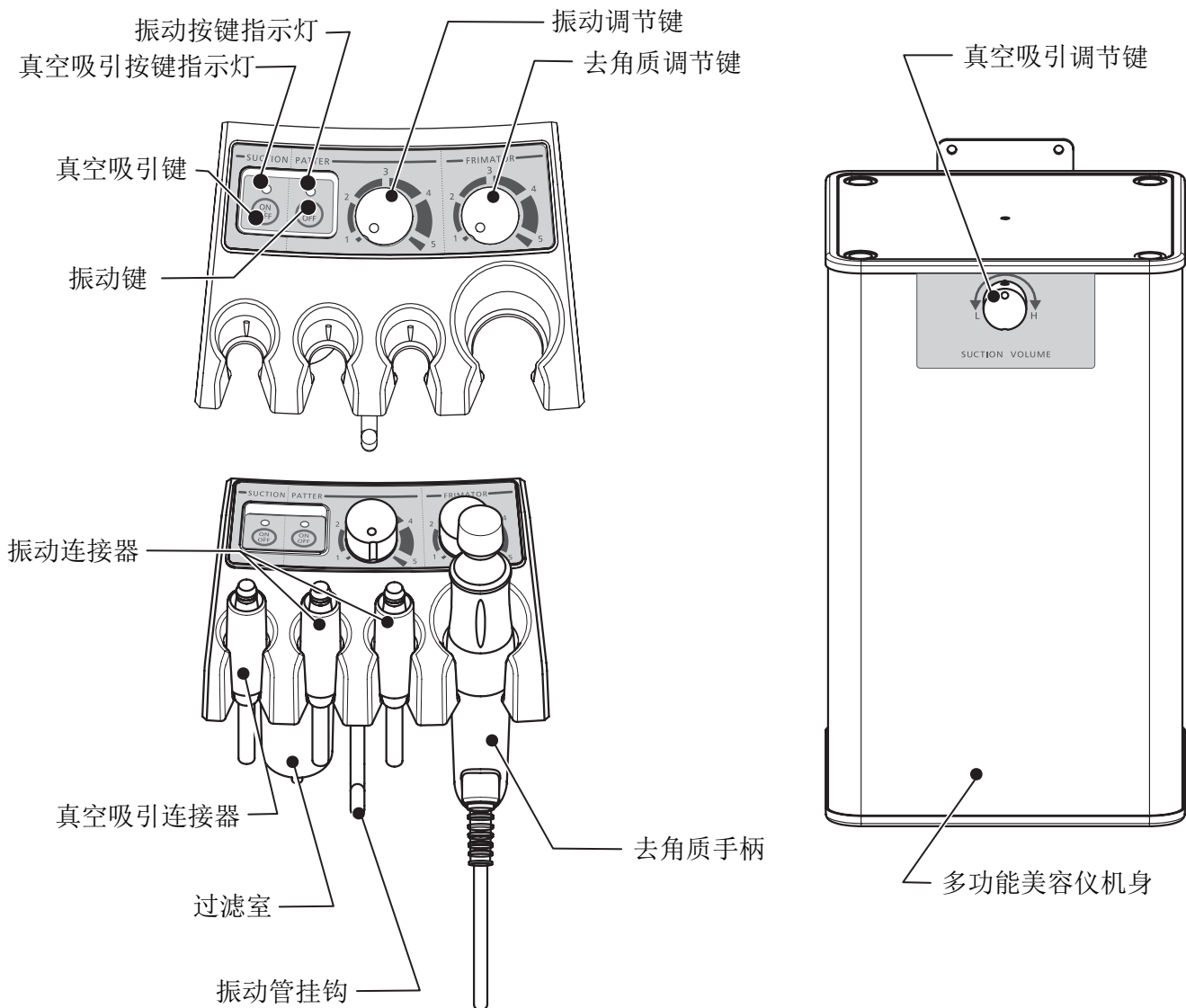

IONOS

冷热美容

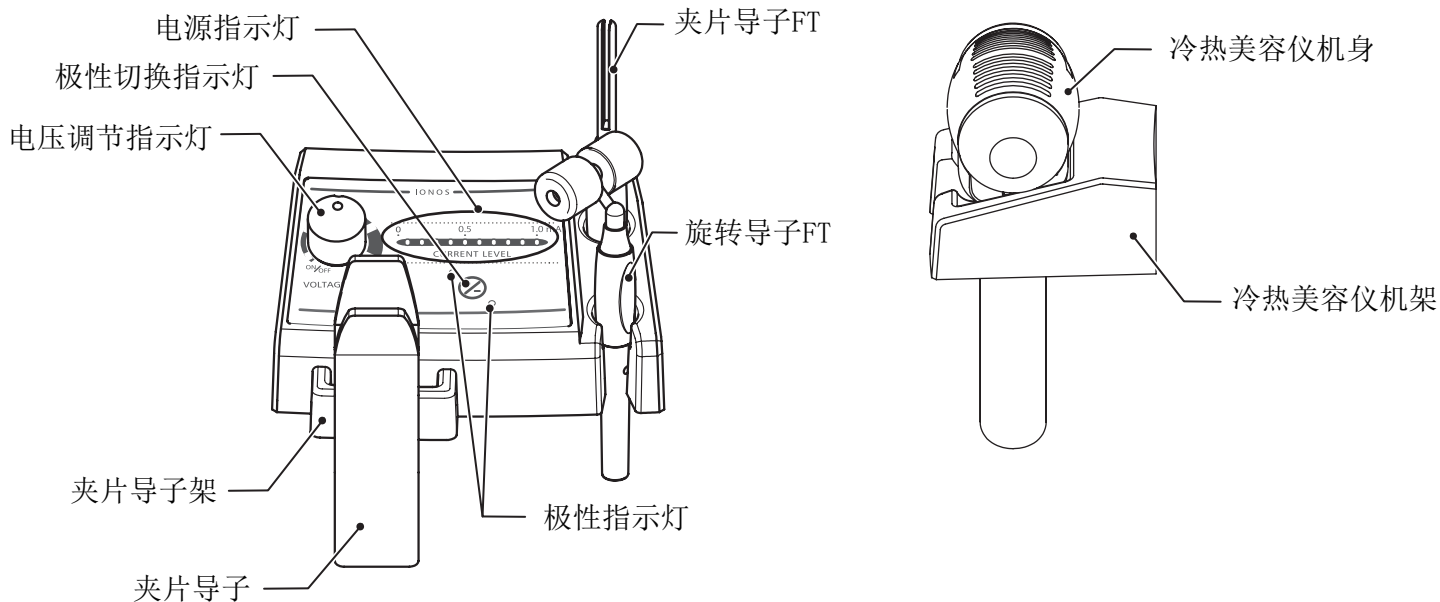

附件



使用说明书
1本

振动。空吸

(灰色)




吸管
1卷

(黑色)



振动管
1卷

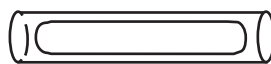


玻璃滤管
(用在空吸软管上)
1个



清洁刷
(用于清洁玻璃管)
1个




玻璃吸管 FT 1号
1个

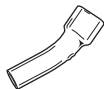

玻璃吸管 FT 2号
1个




玻璃吸管 FT 3号
3个

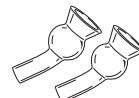

玻璃吸管 FT 5号
2个


※根据玻璃管的制造方法，玻璃内部可能会产生一些气泡，但玻璃的强度没有问题，放心使用。

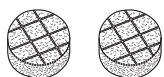

清洁棉28×23 2个
过滤室的备用过滤器



开孔清洁棉28×23 2个
过滤室的备用过滤器

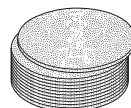


清洁海绵 10个
(外观擦拭用)


※一个已经装在里面了

※一个已经装在里面了


去角质 (购买有去角质功能的机型)

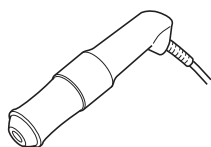

去角质手柄
1个

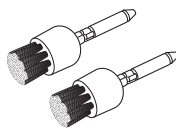


FT 1号刷子
2个

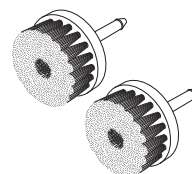


FT 2号刷子
2个

附 件


IONOS

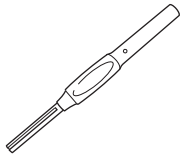


关电机/导子钳FT
1个

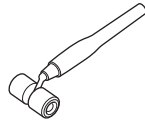


关电机/旋转导子FT
1个

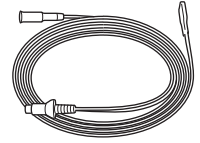


电源线FT
1个

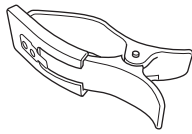

不关电机/导子夹
1个

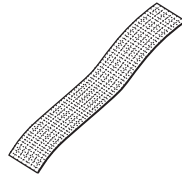

不关电机护板N
1个

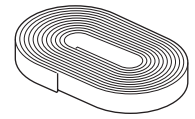


棉卷
1卷
(导子钳子用)



棉花片 60片
(旋转导子用)

冷热美容

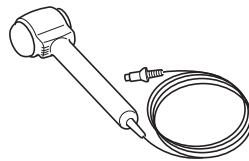


冷热美容器
1个

使用前准备

接通蒸汽机的电源


※如果不先接通蒸汽机的电源，直接打开扩展箱的电源，去角质手柄无法使用。

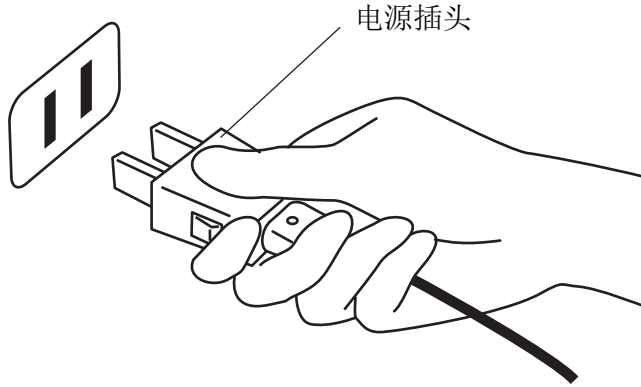


将蒸汽机的电源插头
出入电源插板



电源开关

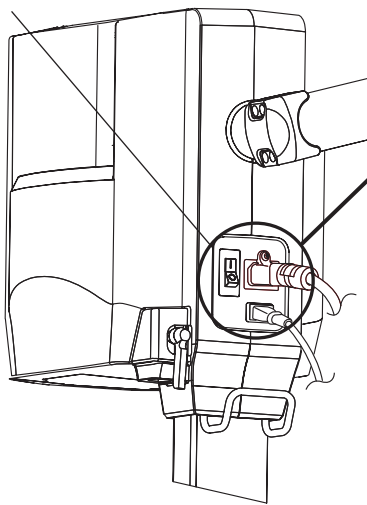

打开电源开关

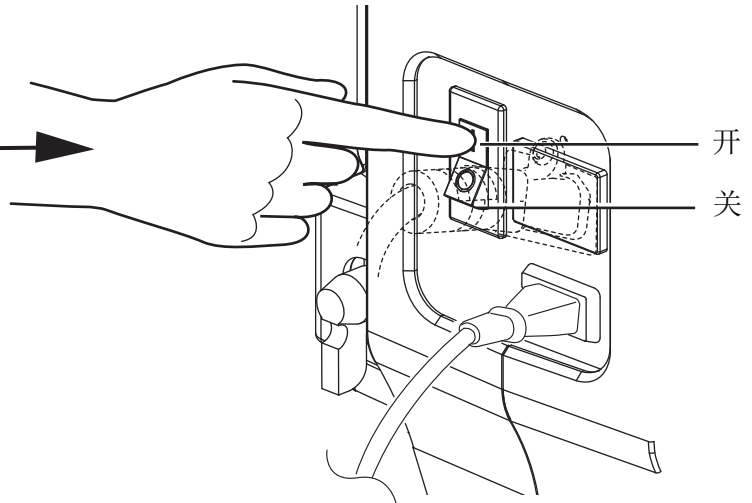

真空吸引 [SUCTION]

通过吸引来清除毛孔内的老化，多余的皮脂。

以下部位禁止使用（空吸）功能



注意

- 有炎症性痘的部位
- 脓包部位
- (白色) 青春痘部位 (黑色青春痘可以使用空吸)

告知

和蒸汽功能同时使用十分钟以上时，蒸汽会被吸入吸管，在吸管内结晶，然后从振动端子滴出。滴水，是正常现象，滴出来的水也不是污水。可以把吸管挂在手柄上，单独运行机器几分钟即可干燥吸管内的水分。


<使用方法>

1 用蒸汽加热皮肤，便于老化,过剩的皮脂的去除。

2 按照使用部位选择吸管



玻璃吸管 FT 1号
使用部位：整个脸部

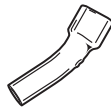

玻璃吸管 FT 2号
使用部位：鼻翼，嘴唇，
皱纹缝隙等




玻璃吸管 FT 3号
使用部位：鼻子，额头，
下巴等





注意

严禁使用破损的玻璃吸管，以免弄伤客人

3 把空吸管接头从挂钩上取下，按下空吸键，空吸指示灯亮。

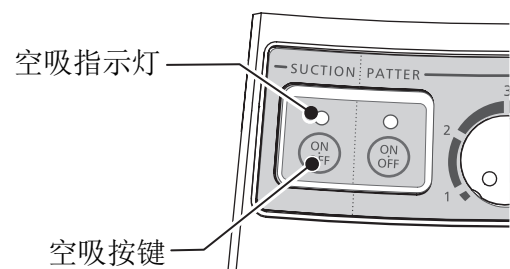


4 将玻璃吸管插到空吸管接头里，直到根部隐蔽（插到底，根部不要露出）。
如果，玻璃管很难插进接头，往玻璃洗头内蘸少量的水，即可。

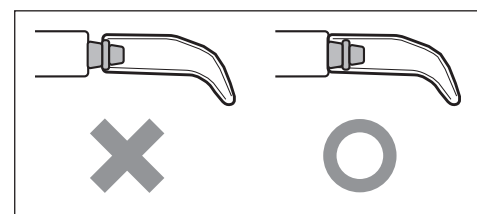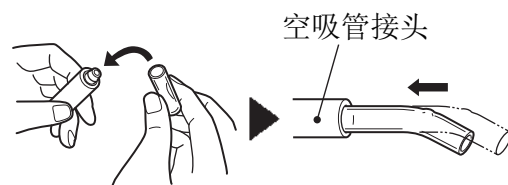

真空吸引 [SUCTION]

- 5 机身上的空吸按键可以调整吸引力大小。
(H: high强, L: low弱)。
护理时, 一般使用强力吸引。
容易充血和潮红的皮肤, 调小吸引力。

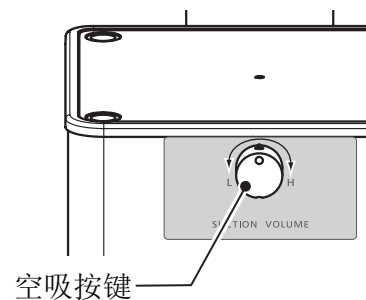


- 6 确认蒸汽是否彻底软化皮肤之后, 再开始护理。

⚠ 注意 不可过度吸引, 过强吸引, 以免引起皮肤问题。

告知 不要吸引液体等, 以免造成机器故障。

- 7 不要吸引液体等, 以免造成机器故障。

- 8 空吸结束后, 关闭空吸键, 确认指示灯是否关闭。拔出玻璃吸管, 将空吸接头放回挂架。

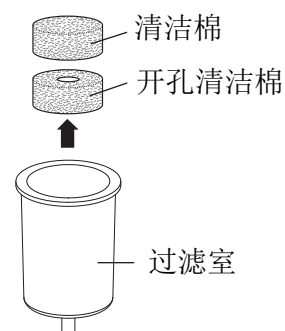

⚠ 注意

- 为了清洁, 请每天清洗过滤室, 清洗之后, 请晾干。
- 过滤室内有水分或不够清洁, 可能会造成机器发生故障。

振动 [PATTER]

通过空气振动，促进淋巴液循环，改善肤色，使皮肤更加亮白。



注意


以下部位禁止使用振动功能

· 炎症型青春痘

· 脓包型青春痘（黄色）

<使用方法>

1 按照不同使用部位选择玻璃管

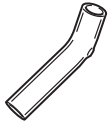

玻璃管 FT3号

使用部位：眼部，额头



玻璃管 FT 5号

使用部位：锁骨，脸颊




注意



严禁使用破损的玻璃管，以免弄伤客人

2 往振动部位涂抹精油

3 从架子上取下振动接头，按下振动键，指示灯亮。

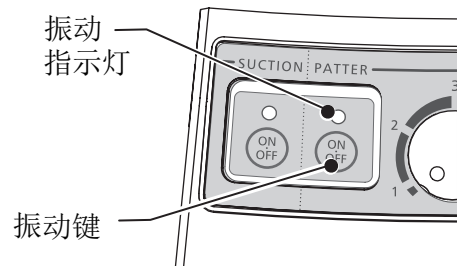


4 将玻璃管紧紧插入振动接头，直到根部隐蔽（插到底，根部不要露出）。
如果，玻璃管很难插进接头，往玻璃洗头内蘸少量的水，即可。

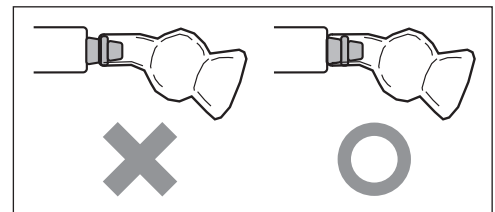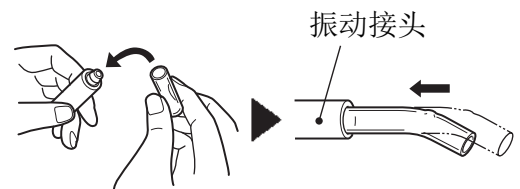

5 右图的旋钮调整振动档位。

1 ~ 3 . . . 慢速，适合振动肌肉。

3 ~ 5 . . . 快速，适合淋巴排毒

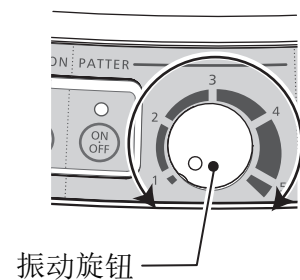

振动 [PATTER]

6 开始做护理

左右两边同时进行振动按摩，要稍微用力按压振动头紧贴皮肤，以可以听到啪啪的声音为准。

7 使用完成后，关闭振动键，确认指示灯是否关闭。

然后，取下玻璃管，把振动接头放回架子。

8 用水或温水浸湿清洁海绵，轻轻拧下，然后，擦去精油。

9 每次使用都要对玻璃管和清洁海绵进行清洗，消毒。清洗，消毒方法请参照22页。

关于清洁海绵

- 1 清洁海绵是密封在塑料袋里的，保存时，请避免阳光直射，以免海绵变色，老化。
- 2 包装海绵时，使用了防腐剂，使用之前，请用水清洗掉防腐剂。
海绵表面如果有白色和鳞片状物质，有味道时，用水彻底清洗即可使用。
- 3 开封后，防腐作用减半，海绵老化加快。恕不负责。
- 4 清洁海绵干燥之后会变硬。用温水轻轻揉搓，即可恢复原来的柔软。
水温不可超过60度。
- 5 海绵遇酸，（苯）酚，合成洗涤剂会老化。故，请避免海绵接触含有酒精的化妆水，含有苯（酚）和酸性的消毒水，以免海绵老化，变质。

去角质清洁 [FRIMATOR]

通过刷子的旋转，清洁化妆品和污物。使用大小不同的刷子清洁脸部的各个部位。

以下部位不可使用去角质清洁功能。



注意

- 炎症青春痘部位
- 眼睛周围等皮肤较薄的部位
- 毛细血管有问题的部位
- 脓包（黄色青春痘）部位
- 刚刚剃过胡子
- 进行过化学脱皮的部位



注意

注意手柄的防水，以免造成机器故障




注意


去角质清洁机是精密机器，撞击，摔落等都可能造成机器故障。请小心使用。

<使用方法>

1 按照使用部位选择刷子

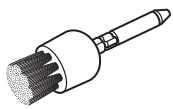


刷子 FT 1号
使用部位：嘴鼻子眉毛发迹线等细小部位

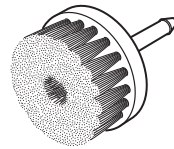

刷子 FT 2号
使用部位：额头脸颊下巴 锁骨 脖子 肩膀


※用温水清洗刷子之后，用干毛巾擦拭掉水分。

2 将刷子插到手柄上，可以听到“啪”的一声。然后放回手柄架。

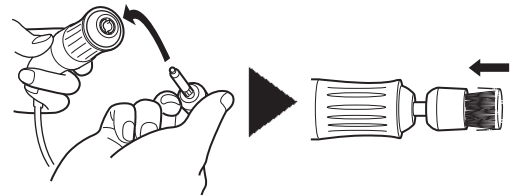

3 清洁部位涂抹清洁霜

4 拿下手柄，按下开始/暂停键

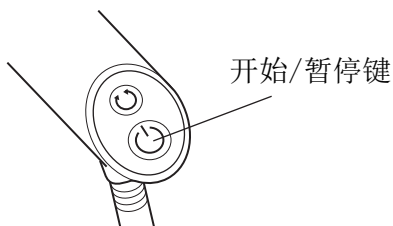


清洁去角质 [FRIMATOR]

5 根据肌肤状况调整清洁去角质速度

刷子选择速度标准


- 1 ~ 3 (旋转速度 慢) 脸部 脖子
- 3 ~ 5 (旋转速度 快) 锁骨

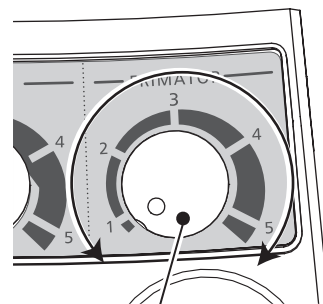

清洁去角质旋钮

6 按下手柄的旋转方向切换键，即可切换刷子旋转方向。每按一次，方向变换一次。



※如果是缺乏弹性的皮肤，建议右脸向左边旋转，左脸向右边旋转。

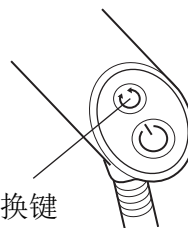

方向切换键

7 开始护理

将刷子与肌肤垂直放置，进行清洁。注意力度。

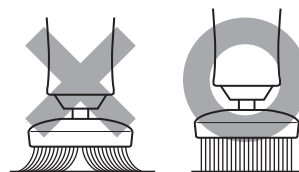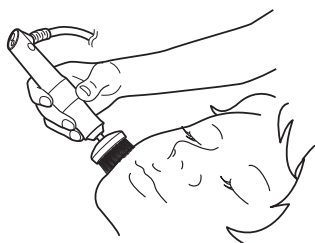


告知

- 头发卷进刷子，比较危险，请务必用头巾扎好头发。
- 停掉机器之后再安装，更换刷子。

清洁去角质 [FRIMATOR]

- 8 使用结束后，按下开始/暂停键，停止旋转，取下刷子，把手柄放回到架子上。

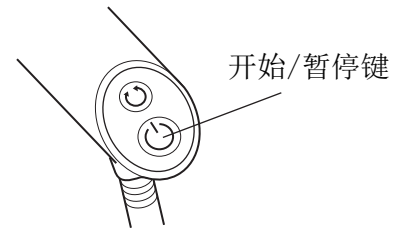

- 9 用水或温水浸湿清洁海绵，轻拧一下，然后擦掉清洁药剂等。

- 10 每次使用都要对刷子和清洁海绵进行清洗，消毒。清洗，消毒方法请参照22页。

关于清洁海绵

- 1 清洁海绵是密封在塑料袋里的，保存时，请避免阳光直射，以免海绵变色，老化。
- 2 包装海绵时，使用了防腐剂，使用之前，请用水清洗掉防腐剂。海绵表面如果有白色和鳞片状物质，有味道时，用水彻底清洗即可使用。
- 3 开封后，防腐作用减半，海绵老化加快。恕不负责。
- 4 清洁海绵干燥之后会变硬。用温水轻轻揉搓，即可恢复原来的柔软。水温不可超过60度。
- 5 海绵遇酸，（苯）酚，合成洗涤剂会老化。故，请避免海绵接触含有酒精的化妆水，含有苯（酚）和酸性的消毒水，以免海绵老化，变质。

IONOS

用「电」进行护理操作。

进行iontophores和disinclusion操作。




注意

- 有以下症状的客人，或者某些部位出现以下问题时请停止使用IONOS
 - 出现炎症痤疮的部位
 - 毛细血管有障碍的部位
 - 实施过物理治疗的部位
- 操作中使用的美容液和清洗剂，请务必向制造商确认以下要点后再使
 - 是否可以离子电渗疗法
 - 化妆品的极性
 - 护理时间

<使用方法>

1 根据使用部位，选择不同的导子（关电极）。

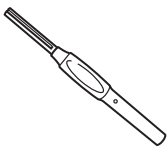

镊子导子FT

使用部位：鼻子等凹凸不平
并且想对窄小部分为
中心进行操作的部分



滚轮导子FT


使用部位：对脸、额头等宽阔的部位为中心，
进行有效率的操作时使用。

使用镊子导子FT前需要做的准备


※连接电源线的状态下请不要进行操作。电源线扭转弯曲容易导致故障。

①把化妆棉剪成10cm左右后，用自来水充分浸湿。


②把化妆棉的一边稍微留长后折叠。
用镊子导子夹住。

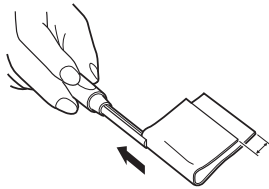


③稍微用力拉平，防止起褶皱

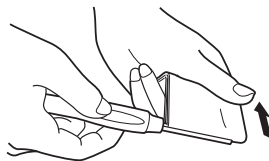

④把稍长的一边尽量留在外侧。

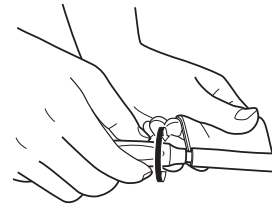



⑤把金属部分完全转进化妆棉里面。

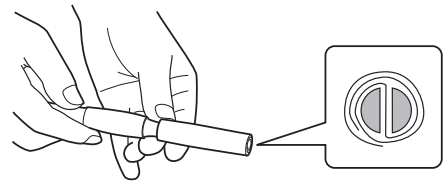

2 把使用的导子和电极线连接后，放到手柄上。

※ 把导子从电源线上拆下时，请捏住连接口。
防止出现电极线断线的情况发生。

※ 连接电极线的导子请放在靠前方的架子上，
不使用的导子放在后方的架子上。

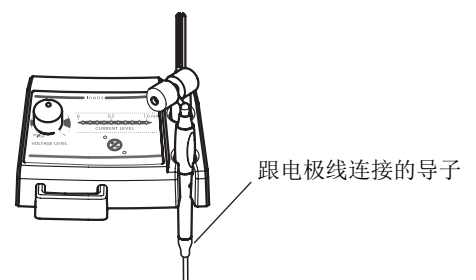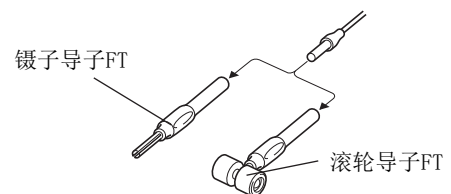

IONOS

3 把不关电极罩N用自来水充分浸湿。



注意

- 用自来水把不关电极罩N均匀浸湿，绑在手腕上。
如果浸湿不均匀，就会给客人造成电刺激
- 操作时，请务必使用不关电极罩N，不使用的話会给客人造成电刺激而导致灼伤。

4 把不关电极罩N缠绕在客人的右手腕上，然后用夹子导子夹住。




告知 ● 如上左图所示，◇图案的一面朝客人的肌肤缠绕。

5 IONOS用的化妆水涂在客人脸上。（使用滚轮导子时）


[使用滚轮导子时的准备工作]

- ①用自来水把两枚纱布充分浸湿后轻轻拧干。
- ②把纱布打开，如图所示铺在客人的脸上（从鼻子到额头）
- ③同样的用纱布覆盖脸的下部分（从鼻子到下巴），
为避免影响客人呼吸鼻孔处不要盖纱布。

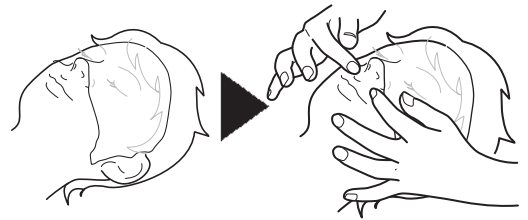

6 按照所使用的化妆水的极性，按下极性切换按钮。

每次按时，「+」和「-」号信号灯会轮流切换。

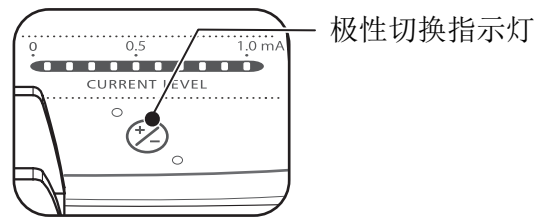

告知

- 请在极性切换按钮的电压调节钮处于「OFF」状态时进行操作。
处于「ON」状态时，极性切换按钮无法操作。

7 把导子轻轻的放在客人的额头处，慢慢移动。一遍跟客人确认是否有刺激感
一遍用输出电压调节钮慢慢升高电压，最后在脸颊处进行调整。



注意

- 请务必在确认客人的反应后慢慢的调整输出电压调节钮。

- 为防止给客人造成激烈的刺激，升高输出电压时，慢慢的调整输出电压调节钮，直至升至设定好的电压。
※降低输出电压时，根据按钮的变化，输出电压会下降。
- 关电极离开客人的脸后，即使调整输出电压调节钮，电压也不会升高。输出电压调节钮的输出电压处于上升状态下，关电极接触脸部时，输出电压会慢慢的上升至设定的电压。
操作时，一边确认客人的反应，一边从最低电压状态电压升至设定的电压。




注意

- 护理时，关电极离开脸部1秒钟以上，输出电压会自动降低。关电极再次接触到脸部时，输出电压会慢慢升至设定的电压。
- 并非输出电压越高，护理效果越好。推荐使用0.5mA以下的电压。
有时可能会因为电流造成灼伤所以务必跟客人确认是否感觉到电流刺激后再升高电压。
如果客人感觉到电流的刺激，要立刻停止升高电压。
- 即使客人没有感觉到电流的刺激，但是电流表示灯如果显示亮着，就证明有电流通过，对电流刺激比较敏感的客人，此时不能再升高电压。
※请务必在关电极移动的状态下使用。

告知

- 电流显示灯表示肌肤中流动的电流值，护理时，电流值会随着皮肤的抵抗而变动。并非是机器故障。电流显示灯

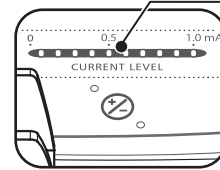

电流显示灯

8

开始护理

导子接触肌肤后，慢慢移动持续操作，保持导子不离开肌肤。
操作时间一般控制在5分钟以内。长时间操作可能造成肌肤问题。

告知

- 护理时间请务必遵守所使用化妆品规定的时间。
- 护理时，如果感觉到强烈的电流刺激，请降低电压。

9

结束时，慢慢降低电压，输出电压调节钮调至「OFF」后，把导子放回固定架上。

10

取下客人手上的不关电极罩

11

每次使用导子和不关电机罩前都要清洗和消毒。

※ 关于洗净和消毒，请参考20页



注意

- 每次使用导子和不关电极罩前都要清洗和消毒
- 在脏的状态下使用，容易造成客人皮肤病。

冷热美容 [PELTIER]

运用PELTIER的效果机能，把温感，冷感传到肌肤，进行各种护理操作。



注意

- 以下部位请不要使用PELTIER
 - 有炎症痤疮的部位
 - 有脓包（黄痤疮）的部位




注意


- PELTIER手柄是非常精密的机器，由于撞击，掉落等原因可能造成机器不能正常使用。所以要小心使用。

<使用方法>

- 1 确认金属罩是否牢固的罩在PELTIER上。

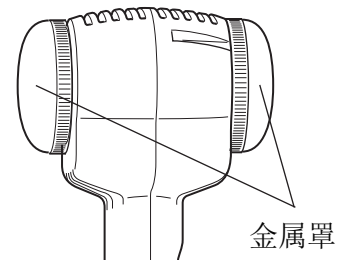

- 2 把PELTIER上的开关调至ON

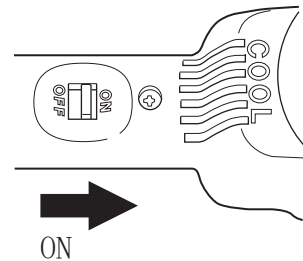

- 3 确认温度是否适当。
(达到合适温度需要花3分钟)




注意

- 确认PELTIER的温度后再接触客人的肌肤。
万一，由于故障而导致金属罩温度异常，会造成客人灼伤。

冷热美容 [PELTIER]

4 开始护理


 注意 ● 由于可能会造成低温灼伤，请不要停留在同一部位超过2秒钟以上，要边移动边操作。

- 热&冷……温（温热面）、冷（冷却面）相互交替，能促进血液循环。
- 冷护理…用冷却面放到用蒸汽喷过的脸上，让脸部肌肤镇静。
- 热护理…把润肤霜等化妆品涂于肌肤，先用温热面操作，提高亲和性，然后用冷却面护理。


 注意

- 请不要堵塞PELTIER的开口部，并防止水和异物进入。因为这些可能造成触电、漏电和火灾。
- 由于PELTIER是精密仪器，需小心使用。不要拉拽PELTIER的电源线。电源线的破损容易造成触电和火灾。

5 使用完毕后，把PELTIER上的开关调至OFF。

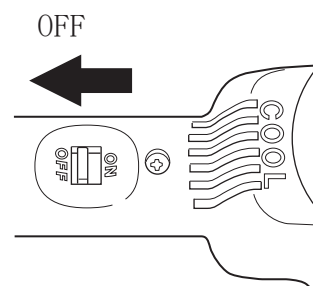


6 每次使用PELTIER时，都要取下两侧的金属罩，洗净并消毒。洗净、消毒方法请参考20页。

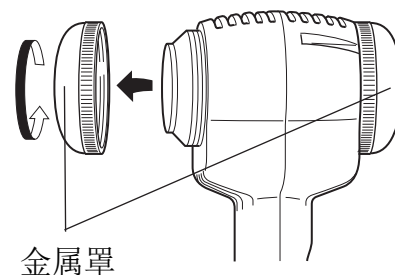

保养方法

- 收纳时，请务必拔出电源插头。

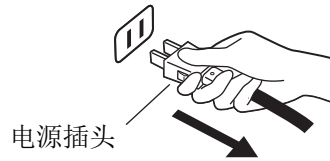


- 塑料、镀金银、涂饰的部分
请用干燥柔软的布擦拭干净。



- 黏上难以去除的污渍或油渍时，
用含有水稀释后的中性清洗剂的棉布擦拭污渍后，
再用拧干的布擦拭。



- 请勿使用香蕉水、酒精、汽油、煤油等挥发性药品、包含有机物的清洗剂、
酸性、碱性、氯气系清洗剂、含有研磨剂的蜡、海绵、刷帚等。

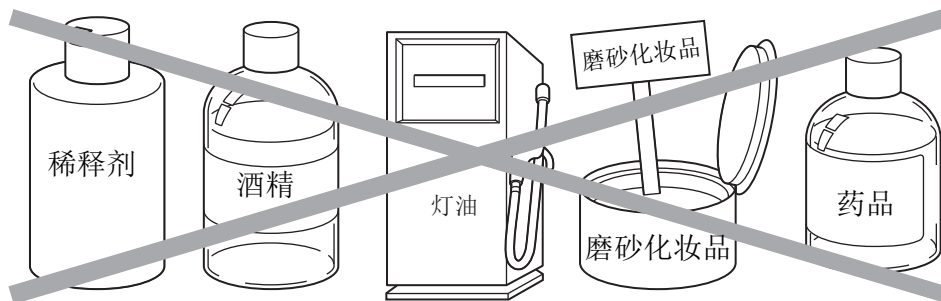

关电极·不关电极 (IONOS)

- ① 用包含中性清洗剂的棉布擦拭污渍。
- ② 用包含消毒酒精的棉布仔细擦拭。
※ 朝一个方向擦拭，请勿回转着擦拭。

金属罩 (PELTIER)

- ① 取下PELTIER上的金属罩
- ② 用含有中性清洗剂的棉布擦拭污渍。
- ③ 用包含消毒酒精的棉布仔细擦拭。
※ 朝一个方向擦拭，请勿回转着擦拭。
- ④ 待完全干燥以后放进紫外线消毒器。用紫外线照射20分钟后可收纳起来。


保养方法

玻璃管（震动式、空吸式）

- ① 使用中性洗涤剂，用附带的刷子清洗，并用自来水充分洗涤。
- ② 浸泡于以下消毒剂水溶液中10分钟以上。
 - 次氯酸钠水溶液0.1%
- ③ 从消毒剂水溶液中取出来，用水洗后使之干燥。
- ④ 放进紫外线消毒器。用紫外线照射20分钟后可收纳起来。

过滤器（空吸）

- ① 从过滤器中取出过滤芯。
- ② 用自来水冲洗。
- ③ 干燥后放回原处。

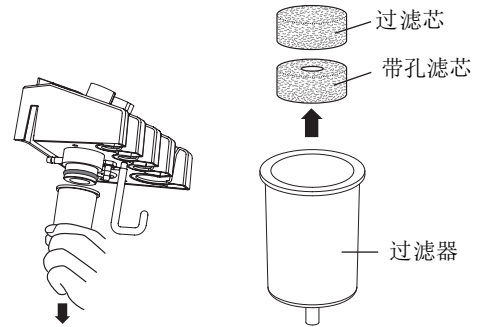


告知

- 为保证清洁，需每天清洗过滤器内部，擦去残留的水渍
- 将残留有水渍和污渍的过滤器放一段时间，会造成机器故障。
(滤芯及软管类属于消耗品，劣化及用脏后需更换)

软管・中间滤芯的保养。

软管内的中间滤芯请每周更换一次。但是，根据使用频度的不同，污染程度也不一样，即使未满一周，如果已经用脏的情况下也请立即清洗。滤芯及软管类属于消耗品。劣化，或者无法清洗干净的情况下请进行更换。如右图所示，折弯软管，取下连接部件，更换中间的滤芯。

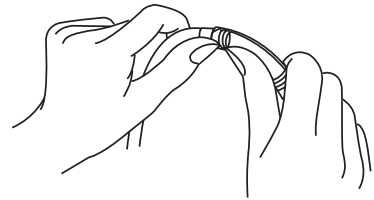

刷子（电动刷）、清洁用的海绵（震动式、空吸式）


- ① 用中性洗涤剂清洗，用自来水充分洗涤。
 - ※ 黏上血的东西请做废弃处理。
- ② 浸泡于以下任意一个消毒剂水溶液中10分钟以上。
 - a. 葡萄糖酸氯己定水溶液 0.05%
 - b. 消毒肥皂水溶液0.1~0.2%（除去海绵）
 - c. 两性界面活性剂水溶液0.1~0.2%
- ③ 从消毒剂水溶液里拿出来，用水洗净后充分干燥。
 - ※ 旋转刷子的合成树脂部分需用乙醇水溶液清洗。
 - ※ 合成树脂长期使用后会因劣化而变质。劣化后需更换。
刷子（电动洗脸刷）属消耗品。
- ④ 用紫外线消毒器的紫外线照射20分钟以上。

告知

- 清洁用的海绵属于消耗品。劣化后请更换。
由于紫外线消毒器和消毒剂水溶液的影响，可能会造成材质的劣化。

委托修理前

按照下表检修后仍然无法恢复正常的情况下，请立即停止使用，断开电源并拔掉插头。请速与直营店或本公司联系。

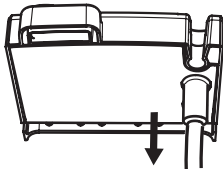发生如下故障	请确认以下项目	处理办法
插入电源无反应	插头是否正确插进插座	电源插头按正确方法出入插座
	电源开关是否打开	打开电源开关
	店里的配电板的保险丝或者电闸是否打开	打开配电板上的保险丝或者电闸开关
	拔出电源重新插入看是否恢复正常	即停止使用，断开电源并拔掉插头。请速与直营店或本公司联系。
电动洗脸刷无反应	电动洗脸刷手柄处的开关是否打开	打开开关
	电动洗脸刷上的开关从插座拔出，重新插入后看是否恢复正常。 	即停止使用，断开电源并拔掉插头。请速与直营店或本公司联系。

出现上述外的其他故障，请立即停止使用，请速与直营店或本公司联系。

产品废弃时

本产品或者是零部件废弃时，请根据当时的规定，做适当的处理。

关于消耗品（包括备选零部件）

消耗品是指在使用过程中能预测到会造成摩擦，劣化，外观变化，破损的零部件。
明显的磨损和损耗，劣化及破损的情况下，需要更换零部件时，请速与直营店或本公司联系。
消耗品的修理及更换属于保修范围以外，会收取相关费用，请悉知。

（※客人使用的环境，条件不同，造成的磨损和损耗，劣化及破损的程度，使用期限也会不一样）
如果客人自己更换零部件的话，不需支付基本费用和技术费。但是要承担运费。
不知道更换方法时，可以与直营店或本公司联系。

● 消耗品（以下零部件属保修外产品，需付费）

< 空吸式&振动式 >



透明管FT
1号



透明管FT
2号



透明管FT
3号




透明管FT
5号


※根据玻璃管的制造方法，玻璃内部可能会产生一些气泡，但玻璃的强度没有问题，放心使用。




清洗刷

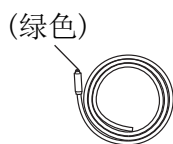

空气管连接管
空吸NA

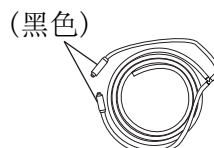

空气管连接管
震动NA

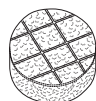

滤芯
28×23



带孔滤芯
28×23




中间过滤用过滤器
用海绵（1m）


< IONOS >



纱布 60张
(滚轮导子用纱布)

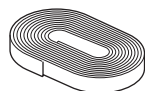

棉纱卷 1卷
(镊子导子用棉纱)

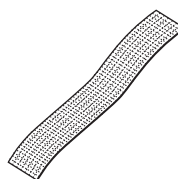

不关电机护板N
1个



电源线FT
1个



离子导入用滚棒
用塑胶头




离子导入用无感电
极夹子塑胶套


< 电动刷 >



刷子FT
1号

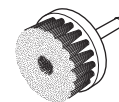

刷子FT
2号

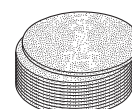

脸部用海绵 10张
(清洁用海绵)

日常保养指南

为确保安全使用本产品，请进行以下检查。

请每天检查


检查项目	检查方法	检查结果、不合格的情况
<input type="checkbox"/> 电源线是否有劣化或破损的情况	使用产品前确认 <input type="checkbox"/> 电源线插头部分是否有变形・破损・劣化。 确认电源线是否有破损・劣化 使用产品时请确认 <input type="checkbox"/> 电源插头部分或者电源线如果劣化会发热。 使用时，用手确认电源插头及电源线是否有发热现象。	由于火灾及漏电可能造成触电和灼伤。需立即更换零部件。请速与直营店或本公司联系。
<input type="checkbox"/> 外部零部件是否有破损或劣化	<input type="checkbox"/> 检查产品整体外部情况，确认零部件是否有破损或者劣化	无法达到产品本来的功能，有时可能还会造成事故（灼伤或触电等）。请速与直营店或本公司联系。
确认电动刷子 <input type="checkbox"/> 刷毛是否能整理整齐	<input type="checkbox"/> 整理刷子的刷毛，把开关调至ON（刷子朝下）转动，确认是否有脱落现象。	操作中，刷子脱落，可能造成顾客受伤。请速与直营店或本公司联系。
<input type="checkbox"/> 刷子先端的刷毛是否有损伤或结块	<input type="checkbox"/> 摸刷子先端的刷毛进行确认。	先端的刷毛出现异常时，无法发挥出正常效果。
<input type="checkbox"/> 透明管是否有损坏	<input type="checkbox"/> 目测确认透明管的前端是否有破碎或裂缝	可能导致客人受伤。请速与直营店或本公司联系。
确认PELTIER <input type="checkbox"/> 金属罩是否有异常	<input type="checkbox"/> 目测确认表面是否有划痕及生锈	可能导致客人受伤。请速与直营店或本公司联系。
<input type="checkbox"/> 是否有异常发热情况	<input type="checkbox"/> 把开关调至ON后等待3分半钟后确认金属罩是否有异常发热的情况	可能还会造成事故（灼伤或触电等）。请速与直营店或本公司联系。
确认IONOS <input type="checkbox"/> 滚轮导子FT是否能正常滚动	<input type="checkbox"/> 转动滚轮导子FT，目测确认是否有卡住的现象	滚轮导子FT转动不顺畅时，可能无法发挥正常的效果请速与直营店或本公司联系。
<input type="checkbox"/> 镊子导子FT是否正常	<input type="checkbox"/> 目测确认表面是否有划痕及生锈	可能导致客人受伤。请速与直营店或本公司联系。

需每天点检（每天下班时点检）


检查项目	检查方法	检查结果、不合格的情况
<input type="checkbox"/> 过滤器 过滤芯的清洁	确认过滤器和过滤芯上是否附着有污渍和黑点。	中间滤芯附着水分和污垢放置时，可能会造成机器故障，用水冲洗过滤器和滤芯，待完全干燥后放回原处。
<input type="checkbox"/> 中间滤芯的清洁	确认中间滤芯是否有污染或被染黑	中间滤芯附着水分和污垢放置时，可能会造成机器故障，取出空吸玻璃管内的滤芯用水冲洗带完全干燥后，放回原处

规格

容吸震动・电动刷

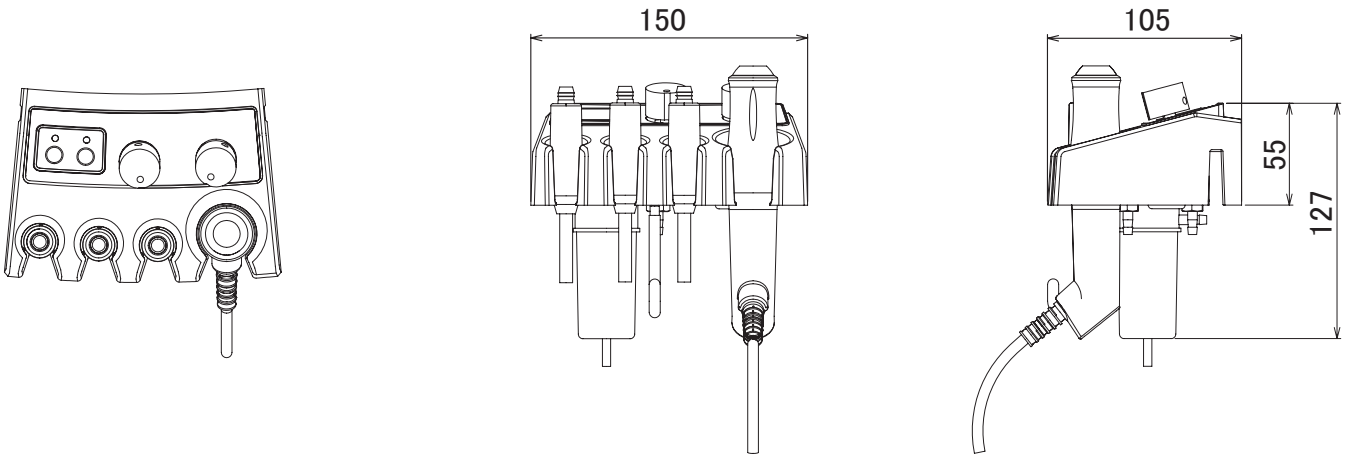


本体盒子

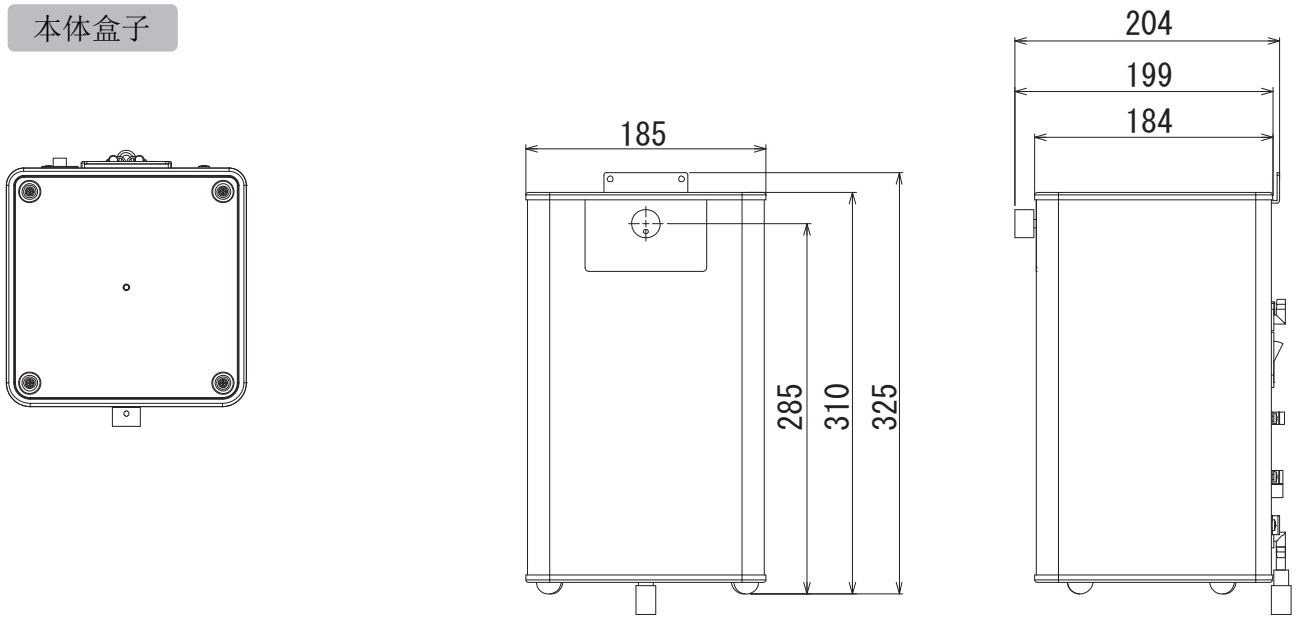


电压・周波数	AC220V 50Hz
震动周期范围	240~600 (回/分)
容吸最大吸引压力	0.065MPa以上
电动刷转动数 (最大时)	325~430rpm

规格

PELTIER

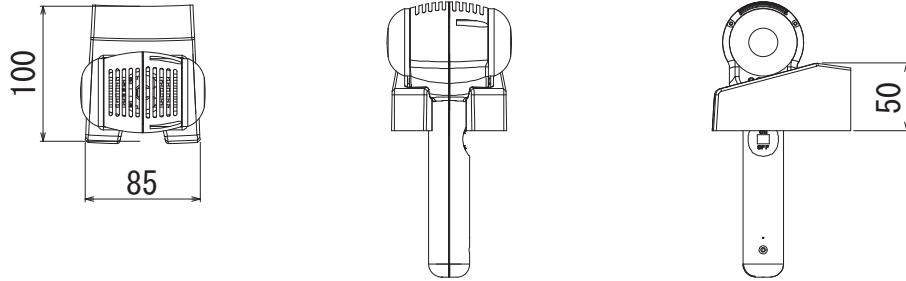

IONOS

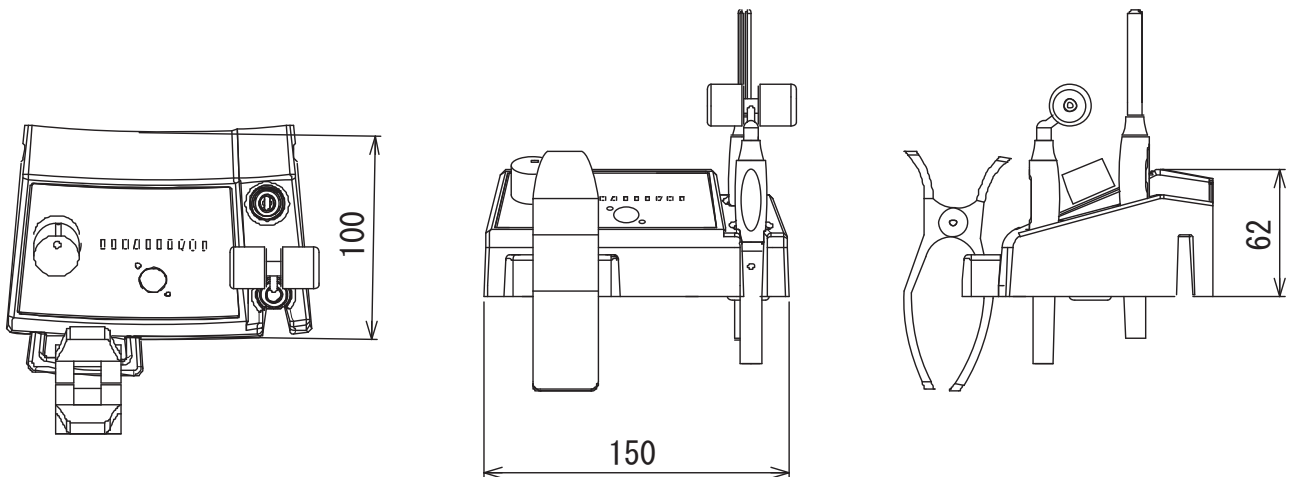

IONOS输出电流、电流范围	-1.0~1.0mA
PELTIER温度	热：38~42° C/ 凉：室温-11° C以下
安全装置	输出电流限定线路（IONOS）

索引

如果发生故障请与最近的直营店或者直接与本公司联系。

日本宝贝蒙株式会社 上海宝贝蒙贸易有限公司

地址：上海市静安区南京西路993号13楼D座

电话：021-6272-8166

传真：021-6272-8133

网址：<http://www.takarabelmont.co.jp>